

Serres Virusfilter

Montering og Retningslinjer fra produsenten



Ref.nr.: NO57702

- ▶ En kort silikonslange festes mellom "grått kne" på ytterbeholderen og filteret. Det er IN-siden (preget merket på filteret) som skal festes mot ytterbeholderen.
- ▶ Filteret viderekobles til sugeejektoren via silikonslangen, som anvist.
- ▶ Filtreringseffekt virus 99,99998 % jfr. Nelson Labs.INC.
- ▶ Produsenten anbefaler filterskifte en gang pr mnd eller ved økt sugemotstand.